

HŮL DŘEVĚNÁ

HD 95/1 - 2

Č.výrobku: 793 141 456 ...

PN 0488/E/95

1. Použití výrobku

Hole se používá v případech, kdy je dostačující pouze mírné jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážné zatížení vzpěrem.

Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

Hůl je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !

2. Popis výrobku

Hůl vycházková HD 95 má tyto hlavní části:

- a.) rukojeť
- b.) nosník
- c.) násadec

Rukojeť ze dřeva je nasazena a zalepena na dřevěném nosníku ukončeném na opačném konci pryžovým násadcem.

Každé provedení hole (HD 95/1 a HD 95/2), které se od sebe liší tvarem rukojeti, je vyráběno ve dvou velikostech (A,B).

3. Hmotnost

Průměrná hmotnost hole je cca 400 g.

4. Rozměry

Délka hole u provedení HD 95/1, HD 95/2

velikost A 850 mm

velikost B 950 mm

Drobnější úpravu délky lze provést po sejmutí násadce, uříznutím nosníku a opětným nasazením násadce.

5. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu hole. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání.

K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha. **Nesmí být použito organických rozpouštědel.**

6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z biologicky rozložitelného materiálu. Poškozený nebo nefunkční výrobek je možno odložit do sběru domovního odpadu.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: Hůl dřevěná

TYP HD 95/1 HD 95/2

ČÍSLO VÝROBKU: 793 141 456 100 793 141 456 200

ČÍSLO PN: 0488/E/95

Velikost: A B



Záruka se nevztahuje na opotřebení hole způsobené jejím obvyklým užíváním podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: