

Protiskluzový nástavec NPS 01

Číslo výrobku: **793 141 120 000**
PN **0199/E/00**

1. Použití výrobku

Protiskluzový nástavec slouží jako doplněk holí a berlí při jejich použití na kluzkém terénu (sníh, náledí). Protiskluzový nástavec se připevňuje na hůl nebo berli pomocí dvoudílné objímky a může být na holi trvale namontován. V případě potřeby se po stlačení plastových koncovek sklopí do funkční polohy.

Je určen zejména pro hole a berle vyráběné fy. ERILENS s.r.o. Lze ho také použít u holí a berlí jiných výrobců, jejichž hole nebo berle mají nosník válcového tvaru o průměru 17 – 22 mm, minimálně do vzdálenosti 100 mm od spodní plochy pryžového násadce. Pryžový násadec by měl mít průměr dosedací plochy mezi 30 – 45 mm.

Nástavec je konstruován pouze pro užívání ve funkční poloze (t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi), pro převážné zatížení vzpěrem.


Nástavec je určen pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !

2. Popis výrobku

Protiskluzový nástavec se skládá z dvoudílné objímky s držákem hrotu, sklopného hrotu s přídržnou pružinou, plastových koncovek a spojovacího materiálu (2 páry šroubů délky 12 a 16mm) viz obr.

Povrchová úprava je provedena galvanickým pokovením.

3. Montáž protiskluzového nástavce na hůl nebo berli

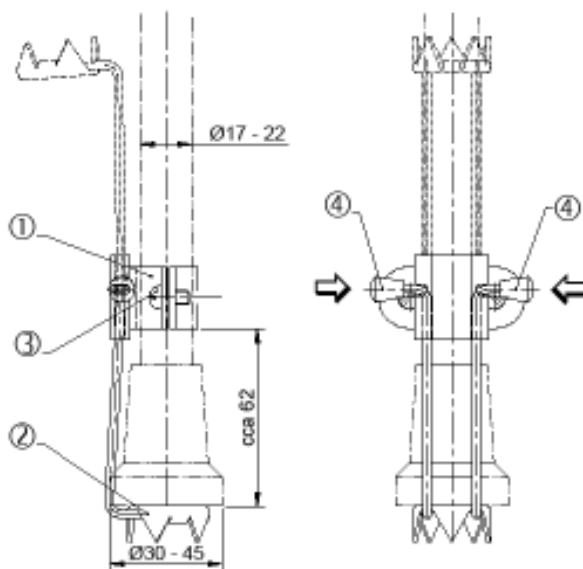

- ❑ Před namontováním protiskluzového nástavce na hůl nebo berli doporučujeme vyměnit pryžový násadec za nový a během používání protiskluzového nástavce dbát na to, aby násadec nebyl příliš opotřebován.
- ❑ Stiskneme plastové koncovky^④ protiskluzového nástavce ve směru šipek a sklopíme hroty^② do funkční polohy (delší strana držáku směřuje k hrotům) viz obr.
- ❑ Odšroubujeme šrouby^③ a sejmemе volný díl objímky
- ❑ Protiskluzový nástavec nasadíme na hůl nebo berli, přiložíme volný díl objímky. Dle průměru válcového nosníku hole nebo berle zvolíme délku šroubů^③ (12 nebo 16 mm), šrouby zašroubujeme, lehce dotáhneme.
- ❑ Horní plochu sklopných hrotů^②

dorazíme na spodní plochu násadce a protiskluzový nástavec natočíme tak, aby v odklopeném stavu byly hroty na straně od těla (dle toho, kterou rukou hůl převážně používáme, u berlí, které používáme v páru provedeme natočení pro pravou a levou ruku) a šrouby^③ pevně dotáhneme.

4. Používání protiskluzového nástavce

- Do funkční polohy se sklápí hroty tak, že stlačením plastových koncovek^④ ve směru šipek (viz obr.) se uvolní zajištění a hroty se sklopí do funkční polohy. Zajištění ve funkční poloze je samočinné.
- Odklápění hrotů se provádí po stlačení plastových koncovek opačným způsobem jako sklápění. Zajištění v odklopené poloze je také samočinné.

5. Čištění a údržba

Po použití nástavce na komunikacích, které jsou ošetřeny posypovým materiálem (sůl, písek) doporučujeme jeho opláchnutí proudem vody a ořtení do sucha.

Kromě čištění nevyžaduje protiskluzový nástavec žádnou zvláštní údržbu pouze po asi 1 měsíci užívání je třeba:

- Zkontrolovat dotažení šroubů objímky (zejména u dřevěných holí a berlí)
- Zkontrolovat vůli mezi spodní plochou pryžového násadce a horní plochou hrotů protiskluzového nástavce. Neměla by být větší než 1 mm.

6. Hmotnost

Hmotnost protiskluzového nástavce je cca 75 g.

7. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Z Á R U Č N Í L I S T

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: **PROTISKLUZOVÝ NÁSTAVEC**

TYP: **NPS 01**

ČÍSLO VÝROBKU: 793 141 120 000

ČÍSLO PN: 0199/E/00



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebení nástavce způsobené jeho obvyklým užíváním podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamáce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: