

Návlek držadla na předloketní francouzskou berli

Číslo výrobku: **793 014 114 701**
PN **0270/E/98**

1. Použití výrobku

Návlek slouží jako měkká bandáž držadla francouzské berle. Zabraňuje možným otlakům při používání této berle. Návlek je určen pro berle francouzské předloketní duralové FD 93, FD 93 NEW a FM 01 (výrobce ERILENS s.r.o.).


2. Popis výrobku

Návlek je zhotoven z jednostranného neoprenu. Zapínání je provedeno našitými pásky suchého zipu.

3. Nasazení návleku na berli

Při nasazování návleku na držadlo se postupuje následujícím způsobem:

- Návlek se položí na držadlo stranou bez textilního potahu a ustaví se jejich vzájemná poloha tak, aby podélná osa potahu byla rovnoběžná s osou držadla ①
- Návlek se přidrží na horní ploše držadla a strana s našitým páskem suchého zipu se obtočí kolem jedné strany držadla ②
- druhá strana návleku se obtočí kolem druhé strany držadla ③
- v místě suchého zipu se obě strany k sobě přitlačí ④

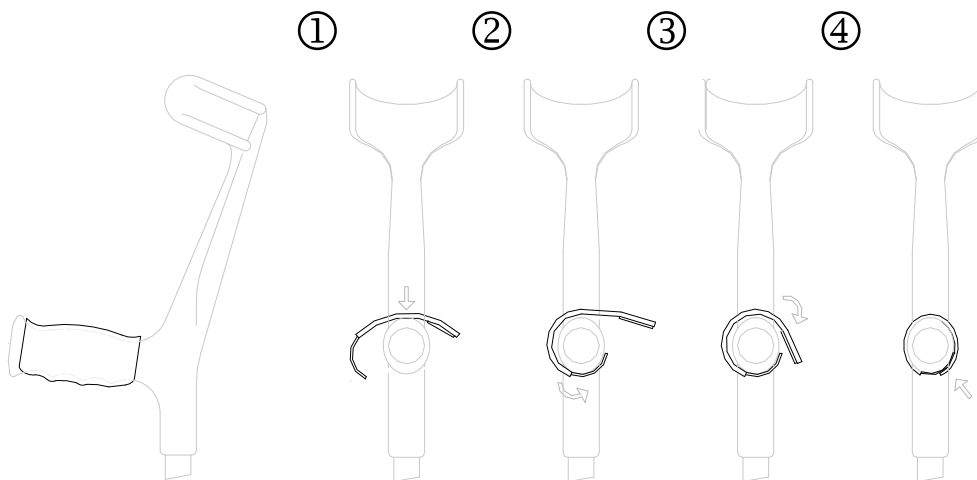

Při nasazování návleku je nutno dbát na to, aby návlek byl na držadle dostatečně napnut a nedocházelo k jeho pootáčení nebo posunu na držadle

4. Hmotnost

Hmotnost návleku je 0,02 kg.

5. Údržba

Návlek lze prát při teplotě vody max.40°C, za použití běžných pracích prostředků. Nesušit v blízkosti zdroje sálavého tepla, nežehlit!

Nesmí být použito organických rozpouštědel.

6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Poškozený nebo nefunkční výrobek je možno zlikvidovat jako běžný komunální odpad .

Z Á R U Č N Í L I S T

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: **NÁVLEK DRŽADLA NA PŘEDLOKETNÍ FRANCOUZSKOU BERLI**

TYP: ND 02

ČÍSLO VÝROBKU: 793 014 114 701

ČÍSLO PN: 0270/E/98



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebenění výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: