

Podložka antidekubitní

Číslo výrobku: **793 137 ...**
PN **0099/E/73**

1. Použití výrobku

Podložka slouží jako pomůcka zabraňující vzniku proleženin u dlouhodobě ležících pacientů.

2. Popis výrobku

Podložka antidekubitní se vyrábí ve dvou provedeních:

- a) Antidekubitní podložka loketní
- b) Antidekubitní podložka patní

Obě provedení jsou vyrobena z PUR (molitanu) tloušťky cca 80mm ve tvaru mezikruží. Provedení se od sebe liší rozměrem vnějšího průměru mezikruží.

3. Rozměry

	podložka loketní	podložka patní
Vnější průměr mezikruží	150 mm	200 mm
Vnitřní průměr mezikruží	50 mm	50 mm
Výška podložky	cca 80 mm	cca 80 mm

4. Údržba

V případě znečištění lze podložku vyprat ve vlažné vodě obsahující malé množství pracího prostředku. Vypranou podložku je nutno zbavit zbytků pracího prostředku řádným propláchnutím v čisté vodě. Podložku zbavenou vody je třeba nechat volně na vzduchu uschnout. Při praní, proplachování a odstraňování vody je třeba podložku pouze opatrně mačkat.

Nesmí být použito organických rozpouštědel.

5. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Poškozený nebo nefunkční výrobek je možno odložit do sběru domovního odpadu.

Z Á R U Č N Í L I S T

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: **ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA**

TYP: **LOKETNÍ** **PATNÍ**
ČÍSLO VÝROBKU: 793 137 582 000 793 137 583 000

ČÍSLO PN: 0099/E/73



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: