



s.r.o., Papírenská 114/5, PRAHA 6

## Dlaha pro fixaci prstů ruky

**A1      A2      A3**

Číslo výrobku: **793 141 344 ...**  
PN                    **0363/E/95**

### 1. Použití výrobku

Dlahy se používají při ošetření poranění v oblasti prvního až třetího článku prstů ruky ( při citlivých řezných poraněních, zhmožděninách, poranění či snesení nehtu, při rupturách natahovačů prstů, distorsi kloubů, doléčování po zlomeninách a operacích na kostech prstů ruky a ve všech případech kdy je třeba zklidnit poranění části prstu). Lze je také použít při sportu (hokej) jako fixaci prstu se současným krytím proti úderům.

Velikost dlahy se volí podle velikosti prstů, lokalizace poranění a potřeby fixace.

**Dlaha je určena pro jedno použití.**

### 2. Popis výrobku

Dlaha pro fixaci prstů ruky má tyto hlavní části:

- a) vlastní dlaha
- b) výstelka

Dlahy jsou vyrobeny z hliníkového plechu, opatřeny polyuretanovou (molitanovou) výstelkou a tvarovány tak, aby dostatečně kryly vnější a vnitřní části článků prstů ruky, případně jejich klouby.

Dlahy se vyrábí ve třech velikostech, které se od sebe liší délkou a šířkou.

### 3. Hmotnost

Velikost	A1	A2	A3
Hmotnost (g)	5	8	10

### 4. Rozměry

Základní rozměry dlahy

Typ	A1	A2	A3
Délka (mm)	56	86	96
Šířka (mm)	18,0	19,5	21,0

## 5. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

### Z Á R U Č N Í L I S T

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5,160 00 Praha 6**

VÝROBEK: **Dlaha pro fixaci prstů ruky**

TYP: ČÍSLO VÝROBKU:

**A1** 793 141 344 100

**A2** 793 141 344 200

**A3** 793 141 344 300

ČÍSLO PN: 0363/E/95



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: