

Dlaha pro fixaci prstů ruky – typ F

F1 F2 F3

Číslo výrobku: 793 141 330 ...
PN 0219/E/03

1. Použití výrobku

Dlahy slouží k fixaci horního a dolního meziprstního kloubu. Dlahy jsou určeny ke znehybnění prstu po distorzích kloubů, poranění vazů, šlach a kloubních pouzder. Lze je použít ke zklidnění po zhmožděninách a po ošetření otevřených ran. Dlaha je vhodná také pro dlouhodobé znehybnění prstu při odtržení extenzoru.

Dlahu lze také použít jako preventivní pomůcku, při sportu a činnostech kdy hrozí poranění prstů ruky.

Velikost dlaha (F1, F2 nebo F3) volí lékař podle velikosti prstů, lokalizace poranění a potřeby fixace.

Dlahu je možno dle účelu použití dotvarovat. Dlaha je na prstě zajištěna dvěma příčnický v horní části a jedním příčnickem ve střední části. V místě těchto příčnicků je možno po nasazení, zajistit náplastí.

Dlaha je nesterilní a je určena pro jedno použití.


2. Popis výrobku

Dlaha pro fixaci prstů ruky má tyto hlavní části:

- a.) vlastní dlaha
- b.) výstelka

Dlahy jsou vyrobeny z hliníkového plechu, opatřeny měkkou výstelkou (expandovaný polyetylén) a tvarovány do základního tvaru, který lze při aplikaci dotvarovat.

Dlahy se vyrábí ve třech velikostech, které se od sebe liší délkou a umístěním fixačního pásku.

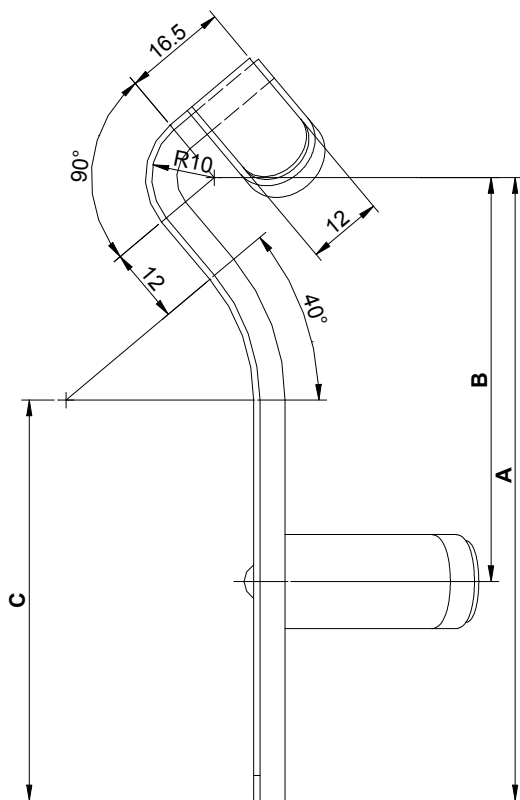

3. Rozměry

Základní rozměry dlaha

Velikost	A (mm)	B (mm)	C (mm)
F1	100	65	64
F2	115	70	79
F3	125	72	89

4. Hmotnost

Velikost	F1	F2	F3
Hmotnost (g)	9	10	11

5. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Z Á R U Č N Í L I S T

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5,160 00 Praha 6**

VÝROBEK: **Dlaha pro fixaci prstů ruky**

TYP: ČÍSLO VÝROBKU:

F1 793 141 330 100

F2 793 141 330 200

F3 793 141 330 300

ČÍSLO PN: 0219/E/03



DATUM KONTROLY:

ZNAČKA KONTROLY



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamacie se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku

Datum prodeje:

Razítko prodejny: