

HŮL DŘEVĚNÁ - ČAKAN

HDC

1. Použití výrobku

Hole se používá v případech, kdy je dostačující pouze mírné jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážné zatížení vzpěrem.

Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°. **Hůl je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !**

2. Popis výrobku

Hůl vycházková HDC má tyto hlavní části:

- a.) rukojeť s nosníkem
- b.) násadec

Rukojeť s nosníkem ze dřeva je ukončeném na opačném konci pryžovým násadcem.

Hůl je vyráběna pouze v jedné univerzální velikosti.

3. Hmotnost

Průměrná hmotnost hole je cca 300 g.

4. Rozměry

Délka hole HDC je 920 mm.

5. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu hole. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání.

K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha. **Nesmí být použito organických rozpouštědel.**

6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z biologicky rozložitelného materiálu. Poškozený nebo nefunkční výrobek je možno odložit do sběru domovního odpadu.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: Hůl dřevěná - ČAKAN

TYP: HDC



Záruka se nevztahuje na opotřebením hole způsobené jejím obvyklým užíváním podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamacie se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodeje: