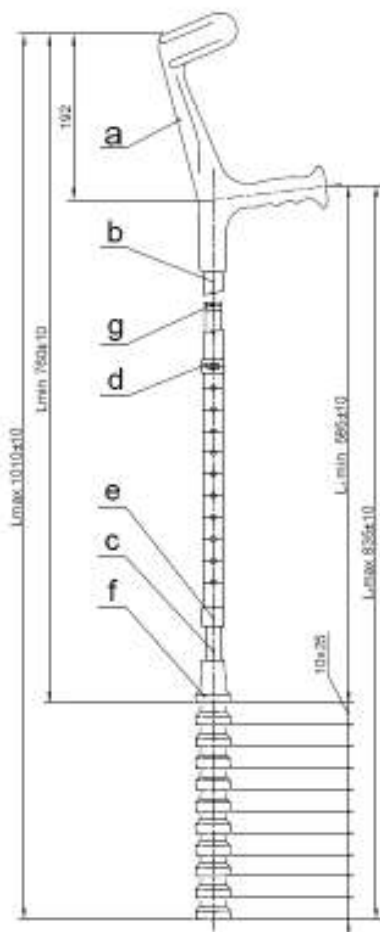


Berle předloketní francouzská duralová dětská

FDD 91

Číslo výrobku: **793 141 147 000**
PN **0444/E/91****1. Použití výrobku**

Berle se používá při chůzi pro odlehčení dolní končetiny nebo při amputaci jedné dolní končetiny tak, že částečná váha těla spočívá na ruce držící rukojeť a opírající se o opěru předloktí.

Berle je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze (t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi) pro převážné zatížení vzpěrem. Berle není konstruována pro vyšší zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !

2. Popis výrobku

Berle předloketní francouzská duralová dětská **FDD 91** má tyto části:

- a) monoblok (loketní opěrka s držadlem)
- b) nosník
- c) nástavec
- d) třmen kolíkem
- e) pouzdro
- f) násadec
- g) vymežovací vložka

Monoblok má ve spodní části vsazen nosník. Do dolního konce nosníku je pevně nasunuto pouzdro a surně uložen nástavec (je možno použít i čtyřstopý nástavec, který se dodává jako příslušenství - není součástí berle FDD 91) s vložkou vymežující vůli mezi nosníkem a nástavcem. Nástavec umožňuje krokové nastavení délky berle po 25 mm s možností nastavení 11 délek berle. Poloha nástavce je zajištěna třmenem s kolíkem. Nástavec je ukončen protiskluzovým pryžovým násadcem.

3. Nastavení délky berle

- a) vyjme se třmen s kolíkem (d).
- b) vysune se nástavec (c) na potřebnou výšku.
- c) zpřesní se poloha otvorů v nosníku a nástavci a zasune třmen s kolíkem (d).

4. Hmotnost

Hmotnost berle **FDD 91** cca 440 g.

5. Rozměry

Délka berle min. (mm) 770

Délka berle max. (mm)	1020
Vzdálenost držadla od loket. opěrky (mm)	192
Vzdálenost držadla od země min. (mm)	585
Vzdálenost držadla od země max. (mm)	835

6. Údržba

K čištění berle lze použít běžné saponátové přípravky a pak berli otřít do sucha. Nesmí být použito organických rozpouštědel.

7. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Z Á R U Č N Í L I S T

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: Berle předloketní francouzská duralová dětská

TYP: FDD 91

ČÍSLO VÝROBKU: 793 141 147 000

ČÍSLO PN: 0444/E/91



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebení berle způsobené jejím obvyklým užíváním podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamáce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: