

Hůl berlová stavitelná


HS 95/1-2

Číslo výrobku: **793 141 455 ...**
PN **0478/E/95**

1. Použití výrobku

Hole se používá v případech, kdy je dostačující **pouze mírné** jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážné zatížení vzpěrem. Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !

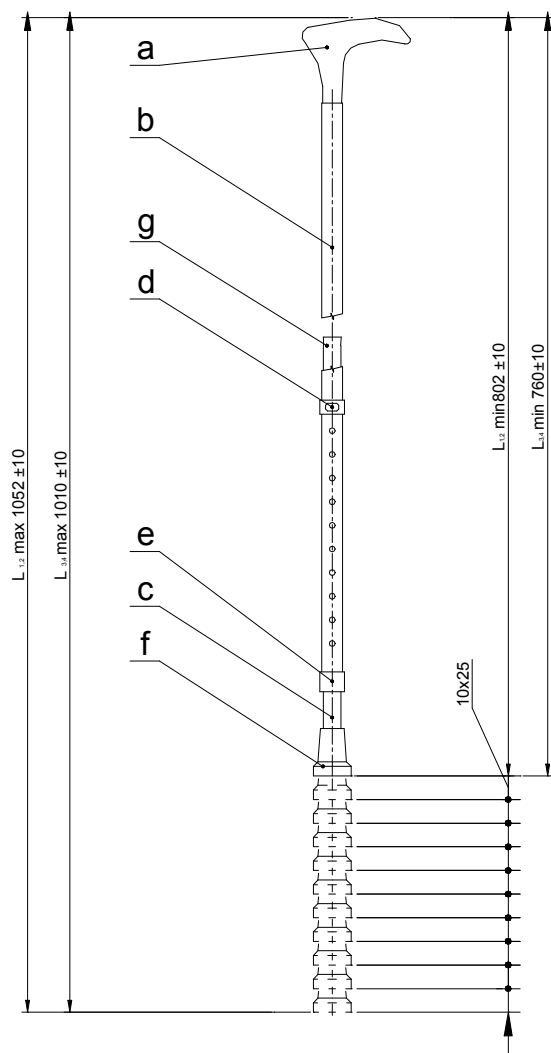

2. Popis výrobku

Hůl berlová stavitelná HS 95 má tyto hlavní části:

- rukojeť
- nosník
- vymezovací vložka
- třmen kolíkem
- pouzdro
- nástavec
- násadec

Rukojeť z integrálního lehčeného polyuretanu (HS 95/2), nebo ze dřeva (HS 95/1) je nasazena a zajištěna v duralové trubce. Do dolního konce nosníku je pevně nasunuto pouzdro a suvně uložen nástavec (je možno použít i čtyřstopý nástavec, který se dodává jako příslušenství - není součástí hole HS 95) s vložkou vymezující vůli mezi nosníkem a nástavcem. Nástavec umožňuje krokové nastavení délky hole po 25 mm s možností nastavení 11 délek berle. Poloha nástavce je zajištěna třmenem s kolíkem. Nástavec je ukončen protiskluzovým pryžovým násadcem

3. Nastavení délky hole

- vyjme se třmen s kolíkem (d).
- vyšune se nástavec (c) na potřebnou výšku.
- z přesní se poloha otvorů v nosníku a nástavci a zasune třmen s kolíkem (d).

4. Hmotnost

Hmotnost hole je cca 400 g.

5. Rozměry

Délka hole	HS 95/1	HS 95/2
Minimální (mm)	760	800
Maximální (mm)	1010	1050

6. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů hole. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání.

K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha. **Nesmí být použito organických rozpouštědel.**

7. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Z Á R U Č N Í L I S T

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00
Praha 6**

VÝROBEK: **Hůl berlová stavitelná**

TYP:	ČÍSLO VÝROBKU
HS 95/1	793 141 455 100
HS 95/2	793 141 455 200

ČÍSLO PN: 0478/E/95



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebením hole způsobené jejím obvyklým užíváním podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamacie se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: