

Hůl vycházková


PN 0278/E/89

H 81

1. Použití výrobku

Hůl se používá v případech, kdy je dostačující pouze mírné jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. ve svislé poloze s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážné zatížení vzpěrem.

Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

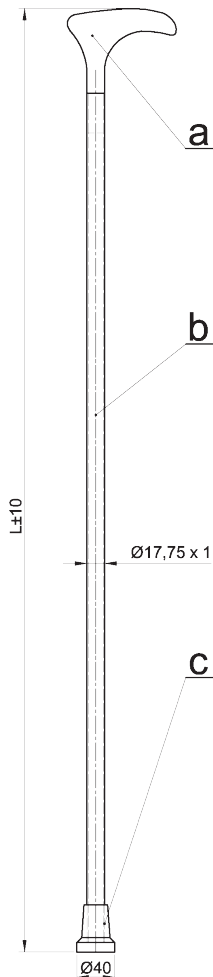

Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg!

2. Popis výrobku

Hůl vycházková H 81 má tyto hlavní části:

- rukojeť (rovná nebo zahnutá)
- duralový nosník
- násadec

Rukojeť, která je vyrobena z polyamidu a TPE pro měkčí úchop, je nalisovaná do duralové trubky ukončené na opačném konci tlumícím násadcem.

Dvě provedení hole, které se od sebe liší tvarem rukojeti (rovná, zahnutá) jsou vyráběny ve čtyřech velikostech.

3. Hmotnost

Hmotnost hole H 81 cca 320g ± 3%

4. Rozměry

Velikost hole	délka
velikost 1	850 mm
velikost 2	900 mm
velikost 3	950 mm
velikost 4	1000 mm

Drobnější úpravy délky hole lze provést uříznutím trubky a opětným nasazením násadce.

5. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů hole. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání. K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha.

Nesmí být použito organických rozpouštědel.

6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

VÝROBEK: HŮL VYCHÁZKOVÁ

TYP: H 81


ČÍSLO PN: 0278/E/89

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebením hole způsobené jejím obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb. Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



DATUM PRODEJE:

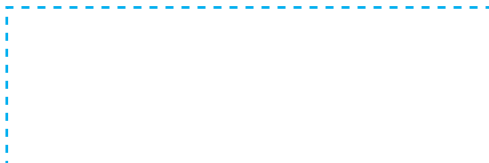

RAZÍTKO PRODEJNY



ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA

tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz

