


Poutko k vycházkové holi

Číslo výrobku: **793 014 114 702**
PN **0273/E/99**

1. Použití výrobku

Poutko slouží k zavěšení vycházkové hole na zápěstí a usnadňuje tím činnosti, při kterých jsou potřeba obě ruce volné např. při nastupování do dopravních prostředků, nákupu apod.

2. Popis výrobku

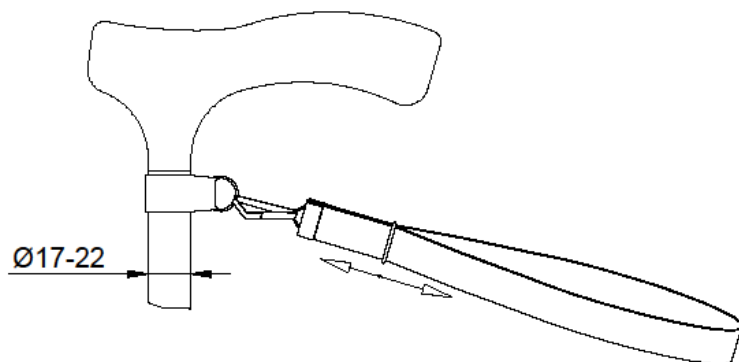

Poutko je určeno zejména pro hole vyráběné firmou ERILENS s.r.o.. Vyrábí se v jedné velikosti a lze jej použít i na hole jiných výrobců, které mají průměr nosníku pod držadlem v rozsahu 17 – 22 mm. Na hůl se poutko upevňuje navlečením pružné objímky s kroužkem do místa přechodu mezi nosníkem hole a jejím držadlem. Vlastní poutko je odnímatelné pomocí karabinky, kterou je spojeno s kroužkem objímky. Délka poutka se reguluje posunem sedlářské vsuvky.

3. Hmotnost

Hmotnost poutka je 30g.

4. Rozměry

Obvod poutka 380 ± 10 mm
Průměr objímky 17-22 mm

5. Montáž

Poutko se upevňuje pomocí pružné objímky, která se navleče na hůl. Navlečení je nejlépe provést po odejmutí pryžového násadce hole. Navlékání přes rukojeť a nebo přes násadec nedoporučujeme. Mohlo by dojít k poškození objímky, které by mohlo mít za následek trvalé snížení její pružnosti a její samovolné posouvání po nosníku hole.

6. Údržba

Poutko lze prát při teplotě vody max.40°C, za použití běžných pracích prostředků. Nesušit v blízkosti zdroje sálavého tepla, nežehlit!

Nesmí být použito organických rozpouštědel.

7. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven zdravím neškodných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek zlikvidujte jako běžný domovní odpad.

Z Á R U Č N Í L I S T

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: **Poutko k vycházkové holi**

ČÍSLO VÝROBKU: 793 014 114 702

ČÍSLO PN: 0273/E/99



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: