


Hůl berlová stavitelná

PN 0478/E/95

HS 95

1. Použití výrobku

Hole se používá v případech, kdy je dostačující pouze mírné jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. svisle s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážně zatížení vzpěrem. Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

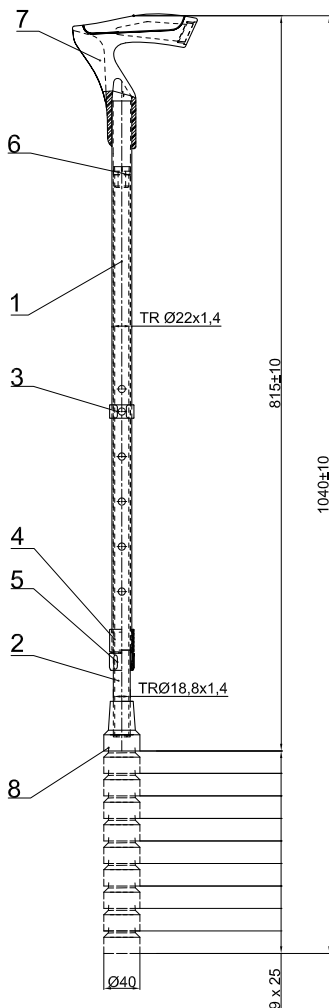

Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 130 kg!

2. Popis výrobku

Hůl berlová stavitelná HS 95 má tyto hlavní části:

1. nosník
2. nástavec
3. třmen s kolíkem
4. pouzdro
5. závitová matice
6. vymežovací vložka
7. rukojeť
8. násadec

Rukojeť z polypropylenu má ve spodní části vsazen nosník. Na dolní konec nosníku je pevně nasunuto pouzdro s maticí a suvně uložen nástavec. Nástavec umožňuje krokové nastavení délky hole po 25 mm s možností nastavení 10 délek berle. Poloha nástavce je zajištěna třmenem s kolíkem a pojištěna dotažením matice pouzdra. Nástavec je ukončen násadcem.

3. Hmotnost

Hmotnost hole HS 95 cca 480 g ± 3 %

4. Rozměry

Délka hole minimální: 815 ± 10 mm
Délka hole maximální: 1 040 ± 10 mm

5. Nastavení délky hole

- a) nejprve se povolí závitová matice (5)
- b) vyjme se třmen s kolíkem (3)
- c) vysune se nástavec (2) na potřebnou výšku
- d) zpřesní se poloha otvorů v nosníku a nástavci
- e) zasune se zpět třmen s kolíkem (3)
- e) utáhne se závitová matice (5)

6. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů hole. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání. K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha.

Nesmí být použito organických rozpouštědel.

7. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

VÝROBEK: HŮL BERLOVÁ STAVITELNÁ

TYP: HS 95

ČÍSLO PN: 0478/E/95



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení hole způsobené jejím obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb. Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



DATUM PRODEJE:

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 01.08.2020

RAZÍTKO PRODEJNY

 **ERILENS s.r.o.**

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz

